


VALVE MAINS LIBRES POUR LA PHONATION  
AVEC IMPLANT PHONATOIRE

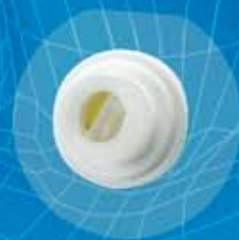

CyValvefreedom™

V A L V E M A I N S L I B R E S

CHGE246 - © Ceredas 2010

# CyValveFreedom™

V A L V E M A I N S L I B R E S

Valve mains libres ou automatique, CyValveFreedom™ est fixé sur l'adaptateur universel CyAdaptor™ et monté, soit sur le calibreur/support CyTubeMajor™, soit sur l'embase du nez artificiel ou ECH\* Cyranose®. Ce dispositif permet au patient laryngectomisé porteur d'un implant phonatoire de parler, sans avoir à obturer manuellement son trachéostome. CyValveFreedom™ est basé sur un principe simple, celui d'une membrane en silicone préformée qui, lors d'une expiration plus soutenue ou plus forcée, se déploie pour fermer l'ouverture de la valve.

Souvent, il apparaît fastidieux pour la personne laryngectomisée de régler une valve automatique, notamment quand les pièces sont trop petites ou difficiles à manipuler. Pour remédier à ces inconvénients, CyValveFreedom™ est doté d'une butée en forme de demi-lune, qui se loge dans l'adaptateur CyAdaptor™ et permet, lors de la rotation de la valve, de régler directement sur soi l'ouverture adéquate pour respirer et parler.

Utilisable sur un support comme le calibreur CyTubeMajor™ et combiné au filtre en mousse et au piège à sécrétions du nez artificiel ou ECH\* Cyranose®, CyValveFreedom™ se révèle, dans un cas comme dans l'autre, un parfait Échangeur de Chaleur et d'Humidité.

## Les + de CyValveFreedom™

### ► De la sortie de l'hôpital à la fin de la cicatrisation et de la radiothérapie :

Durant cette période, CyValveFreedom™ peut être utilisé avec le calibreur CyTubeMajor™ sous le contrôle du praticien et de l'orthophoniste.

### ► Après la fin de la radiothérapie :

Lorsque le patient a acquis une bonne voix trachéo-oesophagienne, maîtrise son souffle trachéal, il peut alors porter CyValveFreedom™ avec le nez artificiel ou ECH\* Cyranose®.

## Les principaux AVANTAGES de CyValveFreedom™

- Simplicité d'utilisation et de réglage directement sur soi grâce à sa butée «demi-lune».
- Facilité de nettoyage liée à sa conception.
- Possibilité de port, tant avec CyTubeMajor™ que Cyranose®, grâce à CyAdaptor™.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
 <b>CyValveFreedom™</b> Valve mains libres	KML4001 

\*Echangeur de Chaleur et d'Humidité



La butée en «demi-lune»  
Une aide au réglage de la valve automatique, directement sur soi



avec CyTubeMajor™



avec embase ECH\* Cyranose®



# Cyranose®

## GLOBAL SYSTEM

### SOLUTION GLOBALE POUR LA RÉHABILITATION PULMONAIRE ET PHONATOIRE APRÈS LARYNGECTOMIE TOTALE



**C**yranose® Global System réunit une gamme de dispositifs destinée aux praticiens et aux patients laryngectomisés pour la réhabilitation pulmonaire et phonatoire de ces derniers, porteurs ou non d'un implant phonatoire.

CHGE246 - © Ceredas 2010